

Fabricado por: **APTEC Diagnostics nv**  
Importado e Distribuído por: Biosys Ltda  
Rua Coronel Gomes Machado, 358, Centro Niterói, RJ  
CEP: 24.020-062  
CNPJ-02.220.795/0001-79  
MS Nº 10350840043  
SAC: +55 21 3907-2534 - [sac@biosys.com.br](mailto:sac@biosys.com.br)  
[www.biosys.com.br](http://www.biosys.com.br)



# TRANSFERRINA

## TRANSFERRIN

**Determinação quantitativa da Transferrina (TRF) em soro humano por teste imunoturbidimétrico.**

**Nº DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE:** VIDE RÓTULOS DOS FRASCOS E DO KIT.

**Artigo** **Apresentação**  
TRF/AUT-000 R1 5 x 25 mL + R2 1 x 10 mL

### Implicações Diagnósticas

A proteína de ligação ao ferro, se liga aos íons férricos prevenindo a intoxicação e perda de ferro pelos rins. Níveis aumentados são encontrados em deficiência de ferro, gravidez, administração de estrogênio e nefrose lipóide. Níveis diminuídos podem ser encontrados em deficiências hereditárias, administração de testosterona, infecção, inflamação aguda, algumas formas de nefroses, tumores, hemocromatose, malária aguda e malnutrição.

### Método

Medição da reação antígeno-anticorpo pelo método de ponto final.

### Reagentes Fornecidos

#### Anti-soro

Fosfato Tamponado Salino (pH 7.43)  
Anti-Transferrina humana policlonal de cabra (variável)  
Azida Sódica (0.95 g/L)

#### Tampão

Fosfato Tamponado Salino (pH 7.43)  
Azida Sódica (0.95 g/L)

### Preparo e Estabilidade dos Reagentes

#### Preparo do Reagente

Reagentes líquidos prontos para uso.

#### Estabilidade e Armazenagem

Os reagentes são estáveis até a data de validade quando armazenados à 2 – 8 °C. A estabilidade no equipamento é de pelo menos 4 semanas se a contaminação for evitada. Não congelar!

### Reagentes Requeridos mas não Fornecidos

- Solução Salina 9 g/L
- Calibradores e Controles

Artigo	Apresentação
MPS/STS-5X1	Multicalibrador 5 x 1mL + Controle 1 x 5 mL
5 9500 99 10 046	Controle TruLab Proteína (Nível 1) - 3 x 1 mL
5 9510 99 10 046	Controle TruLab Proteína (Nível 2) - 3 x 1 mL

Pool de soro humano, líquido e estabilizado. Contém 0.95 g/L de Azida Sódica. O valor é dado na bula.

### Coleta da Amostra

Usar soro fresco. Se o teste não puder ser realizado no mesmo dia, o soro deve ser armazenado à 2 – 8 °C por 48 horas. Se a armazenagem for por um período maior, a amostra deve ser congelada.

### Procedimento para o Teste

**Aplicações para sistemas automáticos estão disponíveis quando requisitadas ou em nosso site: [www.biosys.com.br](http://www.biosys.com.br)**

### Procedimento Manual

Amostra/Calibrador/Controle: diluir 1:10 em salina 9 g/L.

Usar a salina 9 g/L como ponto zero.

Teste: Misturar 25 µL de amostras, calibradores e controle diluídos com 900 µL de tampão. Ler a densidade óptica (DO<sub>1</sub>) das amostras, calibradores e controle a 340 nm. Adicionar 60 µL de Anti-soro de Transferrina. Misturar e incubar por 5 minutos em temperatura ambiente. Ler a densidade óptica (DO<sub>2</sub>) das amostras, calibradores e controle a 340 nm.

Calcular ΔDOs, plotar uma curva de calibração e ler a concentração do controle e das amostras.

### Valores de Referência

170 – 340 mg/dL (IFCC)

Essa faixa é dada apenas para orientação. Cada laboratório deve estabelecer seus próprios valores de referência.

### Características / Desempenho

As características de desempenho para os reagentes de Transferrina foram medidas em um analisador de química clínica (Cobas Mira).

**Faixa de medição:** 0 – 500 mg/dL

**Limite de detecção:** 40 mg/dL

**Efeito Hook:** > 1400 mg/dL

**Sensibilidade:** 0.00093 ABS unidades/unidade de concentração

Precisão: [%CV]	Baixo	Médio	Alto
Intra-corrída	4.78	1.30	0.78
Inter-corrída	4.64	2.46	

Acurácia: [mg/dL]	Controle	Valor Atribuído	Medido
BIO-RAD 1	142 (124 – 168)		153
BIO-RAD 2	328 (262 – 394)		354

**Especificidade:** Monoespecífico

**Interferências:** Nenhuma interferência para Hemoglobina (1000 mg/dL), citrato de sódio (1000 mg/dL), Heparina (50 mg/dL), Bilirrubina (20 mg/dL), Triglicerídeos (2500 mg/dL).

**Limitações:** Nenhuma

**Comparação com a turbidimetria:**  $y = 0.8866x + 40.481$ ;  $r = 0.9756$

Estabilidade à 4°C: pelo menos 3 anos após a produção

### **Cuidados e Precauções**

1. Somente para uso em diagnóstico *in vitro*.
2. Azida Sódica foi reportada por formar azida de chumbo ou cobre em tubulações de laboratórios podendo provocar explosões. Após dispensar soluções contendo Jazida sódica despeje bastante água para diluir completamente.
3. Cada doador usado para preparação dos calibradores e controle foi negativo para a presença de anticorpos de HIV1 e HIV2, bem como para antígenos de superfície de hepatite B e anticorpos anti-hepatite C, usando um método aprovado pelo FDA. Entretanto, todos os produtos obtidos a partir de fluidos do corpo humano devem ser manuseados com cuidado apropriado de acordo com os procedimentos recomendados para materiais biologicamente perigosos uma vez que não pode ser provada a ausência de agentes infecciosos.

### **Garantia**

Estas instruções de uso devem ser lidas atentamente antes da utilização do produto e as instruções nela contidas devem ser rigorosamente cumpridas. A confiabilidade dos resultados do ensaio não poderá ser garantida em caso de desvio às instruções.

### **Descarte**

Seguir as disposições da resolução locais sobre o regulamento técnico para gerenciamento de resíduos de serviços de saúde bem como outras práticas de biossegurança equivalentes, revisão em vigor.

### **Referências**

1. Dati, F. et al., Lab. Med. 13, 87 (1989).

### **APTEC Diagnostics nv**

Industriepark-West 42C 9100 Sint-Niklaas – Bélgica