

Fabricado por: **APTEC Diagnostics nv**
Importado e Distribuído por: Biosys Ltda
Rua Coronel Gomes Machado, 358, Centro Niterói, RJ
CEP: 24.020-062
CNPJ-02.220.795/0001-79
MS/ANVISA Nº 10350840039
SAC: +55 21 3907-2534 - sac@biosys.com.br
www.biosys.com.br



PADRÕES E CONTROLE MULTIPARAMÉTRICOS

MULTIPROTEIN STANDARDS CONTROL

Calibradores e controle para testes de determinação quantitativa imunológica de proteínas em soro humano.

Nº de lote, data de fabricação e validade: vide rótulos dos frascos e do estojo.

Artigo

MPS/STS-5X1

Apresentação

Calibradores 5 x 1 mL + Controle 1 x 5 mL

Uso Previsto

Preparação de curvas de calibração para determinação quantitativa imunológica de proteínas em soro humano e controle de exatidão para determinação das proteínas no soro por turbidimetria e nefelometria.

Composição

Os padrões correspondem a 5 soluções com diferentes concentrações. O controle é uma diluição de soro humano normal, isento de lipídios e fibrinas com fosfato tamponado salino. Conservante: 0.095% de Azida Sódica.

Preparo e Estabilidade

Preparo

Os padrões e controle estão prontos para uso.

Estabilidade e Armazenagem

A data de validade do produto à 2 – 8 °C está indicada no rótulo. Após abrirem os frascos pela primeira vez, podem ser usados em pelo menos 6 semanas se armazenados bem fechados à 2 – 8 °C após o uso. Não congelar!

Valores

Os valores para esse lote podem ser encontrados na bula em inglês.

Precauções e Avisos

1. Somente para uso em diagnóstico *in vitro*.
2. Cada doador individual usado para a produção do soro controle de proteína foi testado para antígeno de superfície de hepatite B (HBsAg), vírus anti-hepatite C (anti-HCV) e anti-HIV1 e HIV2 pelo teste requisitado pela FDA. Somente as doações de amostras negativas foram usadas para a produção. Entretanto, todo produto obtido a partir de fluidos corporais humanos devem ser manipulados com muito cuidado de acordo com os procedimentos recomendados para materiais de risco biológico desde que a ausência de agentes infecciosos não seja provada.
3. Reagentes contendo Azida Sódica devem ser manipulados com o devido cuidado: Não ingerir e não deixar entrar em contato com a pele e membranas de mucosas! A Azida Sódica pode formar azidas explosivas quando em contato com metais pesados como o chumbo ou cobre.

Garantia

Estas instruções de uso devem ser lidas atentamente antes da utilização do produto e as instruções nela contidas devem ser rigorosamente cumpridas. A confiabilidade dos resultados do ensaio não poderá ser garantida em caso de desvio às instruções.

Descarte

Seguir as disposições da resolução locais sobre o regulamento técnico para gerenciamento de resíduos de serviços de saúde bem como outras práticas de biossegurança equivalentes, revisão em vigor.

APTEC Diagnostics nv
Lippeveld 31 9220 Hamme – Bélgica